

Mepilex® Lite

İNCE ETKİN EMİCİ KÖPÜK ÖRTÜ

- Örtü değişimlerinde ağrıyı ve travmayı minimize eder ^{1,2}
- Hassas ve özel yapışma şekliyle sabit kalma özelliği ve konfor birarada
- Pansumanlandığında kaymaz ve istenilen ölçüde kesilebilir *

Safetac® silikon tabaka

- Örtü değişimlerinde travmayı ve hastanın acısını en aza indirir ¹
- Sadece yara çevresindeki sağlıklı ve kuru cilde yapışır, yara yatağına yapışmaz ²
- Yara kenarlarını tamamen kapatarak maserasyon riskini en aza indirir ³

Poliüretan köpük ped

- Eksüdayı emer
- Baskı ve basınç altında işlevini yitirmez
- Vücut hatlarına uyumludur



Poliüretan arka film

- Hava geçirgendir
- Su geçirmez
- Virüs ve bakterilere karşı korur*

* microbes larger than 25 nm

*Mepilex bir sabitleyici ile kullanıldığında yaranın şekline göre kesilmesine gerek yoktur

Safetac® teknolojisi. Daha az ağrı ve daha az travma.

Safetac teknolojisi örtüleme ve örtü çıkarılması sırasında travmayı minimize ederek hastanın acısını en aza indirir. Safetac teknolojisine sadece Mölnlycke Health Care ürünleri olan Mepilex® yara örtüleri, Mepitel®, Mepiform® ve Mepitac® sahiptir.

Daha fazla bilgi için; www.safetac.com




Geleneksel yapışkanlarda cilt soyulması meydana gelir.




Safetac teknolojisinde deride soyulma meydana gelmez.


Mepilex® Lite nasıl kullanılır

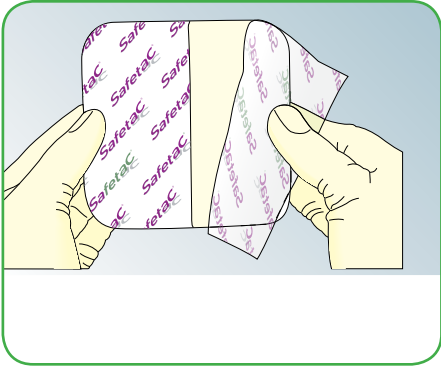

Yarayı temizleyin ve koruyucu filmi çıkarın.

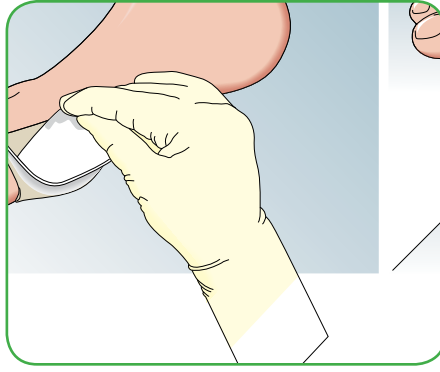

Mepilex Lite, yara yatağının en az 2 cm dışına taşacak şekilde uygulanır. Yapışan yüzü yaraya bakacak şekilde uygulanır. Lütfen gerdirerek uygulamayın.

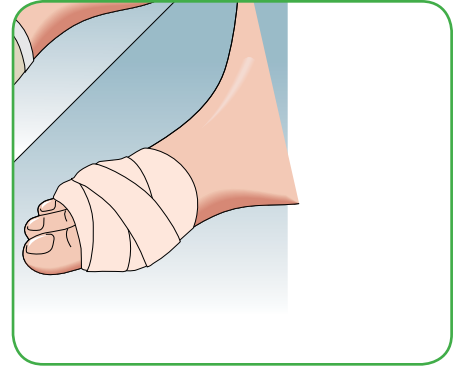

Gerektiğinde Mepilex Lite'nin bir bandaj vb. şekilde sabitleyebilirsiniz.

Mepilex Lite nasıl çalışır

Mepilex Lite ince yüksek uyumlu köpük örtüdür, eksüdayı emerek ve içine hapsederek nemli bir yara ortamını sürdürür. Safetac yüzey yaranın kenarlarını kapatarak eksüdanın yarayı çevreleyen cilde sızmasını engeller ve bu sayede maserasyon riskini en aza indirir. Safetac yüzey atravmatik örtü değişimi sağlar. Mepilex Lite yaranın yerine ve şekline uygun olarak istenilen şekilde kesilebilir.

Mepilex Lite kullanmanın faydaları

- Örtü değişimlerinde acı ve travmayı minimize eder
- Yaraya tutunarak kompresyon ya da bandajlama gibi uygulamalarda yardım gerektirmeksizin işlem yapılabilmesine izin verir
- Örtüldükten sonra hastanın konforunu yükseltir
- Yaygın olarak uygulanan enerji aralıkları ve emilir dozları kullanıldığında radyoterapi sırasında yerinde bırakılabilir
- Basıncı bandaj altında kullanıma uygundur
- Zor bölgelere ve yaranın şekline uygun olarak istenilen şekilde kesilebilir.
- Yaranın durumuna bağlı olarak uygulandığı yarada günlerce kalabilir.
- Yapışma özelliğini kaybetmeden kaldırılabilir ve yeniden konumlandırılabilir.
- Cildi tahriş etme ve alerji potansiyeli çok düşüktür

Kullanım alanları

Mepilex Lite, bacak ve ayak ülserleri, bası ülserleri ve travmatik yaralar gibi geniş bir yelpazede az eksüdalı yaralarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Not

Enfeksiyonun klinik bulguları varken uygun enfeksiyon tedavisine başlamadan Mepilex Lite kullanılırsa enfeksiyonun devam ettiği görülebilir.



MEPILEX LITE ÖLÇÜLERİ (steril paketli)

Ürün Kodu	Ölçü (cm)	Adet İç Kutu	Adet Dış Kutu
284022	7,5 x 8,5	5	70
284122	12,5 x 12,5	5	50
284322	17,5 x 17,5	5	25

