



## YÜKSEK EMİCİ GÜCE SAHİP KÖPÜK ÖRTÜ

- Örtü değişimlerinde ağrıyı ve travmayı minimize eder<sup>1,2</sup>
- Hassas ve özel yapışmasıyla birlikte sabit kalma özelliği ve konfor bir arada
- Pansuman yapılan bölgede kaymaz ve istenilen ölçüde kesilebilir\*

### Safetac® silikon tabaka

- Örtü değişimlerinde travmayı ve hastanın ağrısını en aza indirir<sup>1</sup>
- Sadece yara çevresindeki sağlıklı ve kuru cilde yapışır, yara yatağına yapışmaz
- Yara kenarlarını tamamen kapatarak maserasyon riskini en aza indirir<sup>3</sup>

### Poliüretan köpük ped

- Eksüdayı emer
- Baskı ve basınç altında işlevini yitirmez
- Vücut hatlarına uyumludur



### Poliüretan arka film

- Hava geçirgendir
- Su geçirmez
- Virüs ve bakterilere karşı korur

\* microbes larger than 25 nm

Safetac® technology

\*Mepilex bir sabitleyici ile kullanıldığında yaranın şekline göre kesilmesine gerek yoktur

### Safetac® teknolojisi. Daha az ağrı ve daha az travma.

Safetac teknolojisi örtüleme ve örtü çıkarılması sırasında travmayı minimize ederek hastanın acısını en aza indirir. Safetac teknolojisine sadece Mölnlycke Health Care ürünleri olan Mepilex® yara örtüleri, Mepitel®, Mepiform® ve Mepitac® sahiptir.

Daha fazla bilgi için; [www.safetac.com](http://www.safetac.com)



Geleneksel yapışkanlarda cilt soyulması meydana gelir.



Safetac teknolojisinde deride soyulma meydana gelmez..

## Mepilex® nasıl kullanılır



Yarayı temizleyin ve koruyucu filmi çıkarın.



Mepilex, yara yatağının en az 2 cm dışına taşacak şekilde uygulanır. Yapışan yüzü yaraya bakacak şekilde uygulanır. Lütfen gerdirerek uygulamayın.



Gerektiğinde Mepilex'i bir bandaj vb. şekilde sabitleyebilirsiniz.

## Mepilex nasıl çalışır

Mepilex yumuşak ve son derece uyumlu bir köpük yara örtüsüdür, eksüdayı emer ve nemli bir yara ortamı sağlar. Safetac tabaka yara kenarlarını kapatır ve yara yatağı çevresine eksüdanın sızmasını engeller, böylece maserasyon riskini en aza indirir. Safetac tabaka örtü değişiminin yaraya ve çevresindeki cilde zarar vermeden ve hastaya fazladan bir ağrıya neden olmadan gerçekleşmesini sağlar.

## Mepilex kullanımının faydaları


- Örtü değişimlerinde ağrı ve travmayı minimize eder
- Yaraya tutunarak kompresyon ya da bandajlama gibi uygulamalarda yardım gerektirmeksizin işlem yapılabilmesine izin verir.
- Basınçlı bandaj altında kullanıma uygundur, işlevini yitirmez.
- Uygulamanın zor olduğu bölgelere göre veya yaranın gerektirdiği bir şekilde kesilebilir ve bu durumda hiçbir özelliğini kaybetmez.
- Örtüldükten sonra hastanın konforunu yükseltir.
- Yaranın durumuna bağlı olarak uygulandığı yarada günlerce kalabilir.
- Yapışma özelliğini kaybetmeden kaldırılabilir ve yeniden konumlandırılabilir.
- Cildi tahriş etme ve alerji potansiyeli çok düşüktür.

## Kullanım alanları

Mepilex, bacak ve ayak ülserleri, bası ülserleri ve travmatik yaralar gibi geniş bir yelpazede eksüdalı yaralarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

## Not

Efeksiyonun klinik bulguları varken uygun efeksiyon tedavisine başlamadan önce Mepilex kullanılırsa efeksiyonun devam ettiği görülebilir.

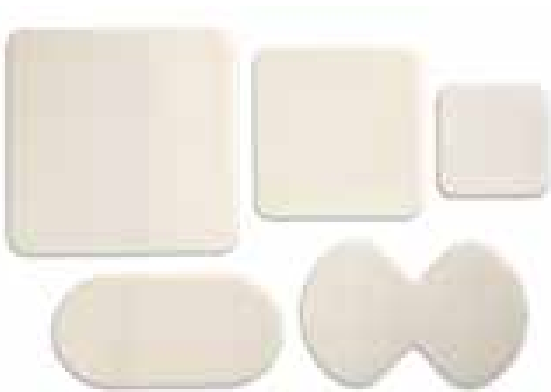

## MEPILEX ÖLÇÜLERİ (steril paketlenmiş)

Ürün Kodu	Ölçü (cm)	Adet İç Kutu	Adet Dış Kutu
294000	12,5 x 12,5	5	50
294201	10 x 21	5	45
294310	17,5 x 17,5	5	25
294410	21 x 22	5	20

## MEPILEX TALON ÖLÇÜLERİ

288200	13 x 21	5	25
288300	15 x 22	5	30