

Tubifast™ WITH 2-WAY STRETCH™ TECHNOLOGY

Hafif, tbler yara rts tutucusu

Yeni Tubifast 2-Way Stretch, dnyanın ilk ve tek dairesel ve boylamsal gerilen hafif elastik tbler bandajıdır.¹ Bu esiz hareket zelliđi, artırılan rahatlık seviyesiyle hastalara tam hareket zgrlđ sađlar. Yara rts tutmak veya vcudun herhangi bir blgesini kaplamak iin idealdir. Aynı zamanda yama sarmak iin ve alı altı sargısı olarak da kullanılabilir. Tubifast 2-Way Stretch, yara rtsn bant, iđne veya ip gerekmezken güvenli bir biimde yerinde tutar. Geleneksel tbler bandajlara oranla daha az yıpranma² riski ile hızlı ve kolay bir kullanıma sahiptir.

Tubifast 2-Way Stretch, rahat hissetmeniz iin konstriksiyon veya kompresyona sebep olmadan yara rtsn güvenli bir biimde tutar.

Tbler grnt sunar. İđne veya banda ihtiya yoktur

Kullanımı hızlı ve kolaydır: boyuta gre kesin ve kaymayacak veya sıkılmayacak Őekilde oturması iin yara rts zerinde gerin

Kullanımın hızlı ve kolay olması, apraz kontaminasyon riskinin azaltılması

Daha az yıpranma olması, yarada lif riskini azaltır²

eitli seeneklere sahip mevcut boylarıyla, israfı en aza indirir ve maliyet etkinliđi sađlar.

5 renk koduyla mevcut Tubifast 2-Way Stretch, Őekli ve boyutu fark etmezken tm uzuvlara rahata uyacak Őekilde tasarlanmıŐtır.

Tubifast 2-Way Stretch sahip olduđu hafif, dairesel ve boylamsal esnekliđi sayesinde, daha fazla rahatlık sađlar ve hastalara tam hareket zgrlđ verir.¹



Tubifast 2-Way Stretch'in çalışma şekli

Yeni Tubifast 2-Way Stretch, hafif esneklik sağlamak üzere viskozdan üretilmiştir. Dairesel ve boylamsal olarak son derece ince elastan ipliklerle kumaşa dikilmiştir.

Tubifast 2-Way Stretch konstriksiyon veya kompresyona sebep olmadan yara örtüsünü güvenli bir biçimde tutar. İğneye veya banda gerek yoktur. İki yönlü gerilme özelliği hastalara tam hareket özgürlüğü ve daha fazla rahatlık sağlar.


Tubifast 2-Way Stretch beş genişlik çeşidiyle mevcuttur ve şekli ve boyutu fark etmeksizin tüm uzuvlara rahatça uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Her boyut, bandaja dikilmiş renkli bir çizgi ile tanımlanır. Kullanımı hızlı ve kolaydır: boyuta göre kesin ve kaymayacak veya sıkılmayacak şekilde oturması için yara örtüsü üzerinde gerin.

Kullanım alanları

Tubifast 2-Way Stretch vücudun herhangi bir parçası için yara örtüsü tutucusu ve deri koruması olarak kullanılabilir. Aynı zamanda yama sarmak için ve alçı altı sargısı olarak da kullanılabilir. Tübüler yapısı sayesinde Tubifast 2-Way Stretch, özellikle amputé hastaların amputasyon güdükleri gibi zor alanlar üzerinde yara örtülerini tutmak için uygundur.

Tubifast 2-Way Stretch'in kullanımı

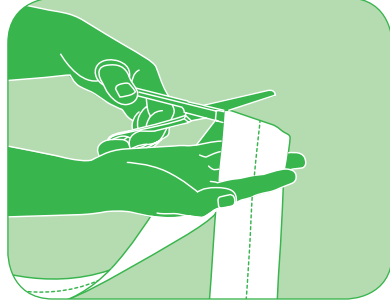

1. Hızlı renk kodu referansından faydalanarak doğru genişlikteki bandajı seçin ve istediğiniz uzunluk kadar kesin



2. Tubifast 2-Way Stretch'i etkilenen alan üzerinde gerin



3. Tubifast 2-Way Stretch'i yara örtüsünü kaplayacak şekilde yerleştirin. Daha ileri seviyedeki uygulamalar için örneklî, adım adım talimatlar mevcuttur

Tubifast 2-Way Stretch'in Faydaları

- Tubifast 2-Way Stretch konstriksiyon veya kompresyona sebep olmadan yara örtüsünü güvenli bir biçimde tutar
- Dairesel ve boylamsal olarak germesi, daha fazla rahatlık ile hastalara tam hareket özgürlüğü sağlar¹
- İsrafi en aza indirerek maliyet etkinliği yaratan çeşitli uzunlukları mevcuttur
- Kullanımı hızlı ve kolaydır: kolayca boyuta göre kesin ve kaymayacak veya sıkılmayacak şekilde oturması için yara örtüsü üzerinde gerin
- Birçok hızlı başvuru kılavuzunda mevcut olan ve küçük uzuvlardan yetişkin gövdelerine kadar her uygulamaya uygun renk kodlu boyutlar
- Daha az yıprandığından yarada lif riskini azaltır²

Lifin içeriği

Viskoz, Elastan ve Poliamit

Yıkama talimatları



Doğal kauçuk lateks, Tubifast 2-Way Stretch'in veya ambalajının bileşeni değildir.

Tubifast 2-Way Stretch Sipariş Bilgileri

Ürün	Genişlik x Uzunluk	Uzuv	Madde No.	PIP Kodu	NHS Kodu
KIRMIZI ÇİZGİ Küçük uzuvlar	3.5cm x 1m	9-18 cm	2480	005-0088	-
	3.5cm x 10m	9-18 cm	2434	026-8698	EGP115
YEŞİL ÇİZGİ Küçük ve orta uzuvlar	5cm x 1m	14-24 cm	2481	005-0039	-
	5cm x 3m	14-24 cm	2485	255-1885	-
	5cm x 5m	14-24 cm	3555	255-5803	-
	5cm x 10m	14-24 cm	2436	026-8680	EGP117
MAVİ ÇİZGİ Büyük uzuvlar	7.5cm x 1m	24-40 cm	2482	004-9924	-
	7.5cm x 3m	24-40 cm	2486	255-1877	-
	7.5cm x 5m	24-40 cm	3556	255-5811	-
	7.5cm x 10m	24-40 cm	2438	026-6924	EGP119
SARI ÇİZGİ Çok büyük uzuvlar, kafa, çocuk	10.75cm x 1m	35-64 cm	2483	023-6539	-
	10.75cm x 3m	35-64 cm	2487	255-1869	-
	10.75cm x 5m	35-64 cm	3557	255-5829	-
	10.75cm x 10m	35-64 cm	2440	000-6221	EGP121
MOR ÇİZGİ Yetişkin gövdesi	20cm x 1m	64-130 cm	2479	324-1452	-
	20cm x 5m	64-130 cm	3558	324-1486	-
	20cm x 10m	64-130 cm	2444	-	EGP107

Tubifast 2-Way Stretch tekli olarak paketlenir.

Yetkili Distribütör: İNTRA
Medikal Gereçler Pazarlama Ltd. Şti.
Kore Şehitleri Cad. No: 48-50 Deniz İşhanı
34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Tel. : 0 212 274 47 52
Faks : 0 212 288 20 82
E-posta : molnlycke@intramedical.com.tr



¹ Published data shows that Tubifast 2-Way Stretch exceeds the minimum requirement of longitudinal stretch for the actions of sitting, bending and flexing. Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.

² Data on file - Fibre Survey carried out on behalf of Mölnlycke Health Care Limited, May 2009.

Mölnlycke Health Care AB (publ) Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00.
www.molnlycke.com

The Mölnlycke Health Care name and logo and Tubifast and 2-Way Stretch are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. Global Patent Pending.



UK231500803